

¿Cómo funciona?

Noltrex®Vet sustituye la falta de propiedades lubricantes del líquido articular comprometido para reducir la fricción y brindar protección física al cartílago. La protección del cartílago es fundamental para mantener las articulaciones sanas y sin dolor.

¿Qué tan efectivo es Noltrex®Vet en comparación con otras terapias articulares disponibles?

Hay muchos tipos y variantes de terapias disponibles para los Médicos Veterinarios actualmente. Sin embargo, en una encuesta reciente de veterinarios experimentados familiarizados con el uso de Noltrex®Vet, se consideró muy eficaz y en la mayoría de los casos como segunda opción si un tratamiento inicial tenía malos resultados.

¿En qué articulaciones debo considerar inyectar Noltrex®Vet?

La respuesta corta es cualquier articulación. Inicialmente, se recomendó Noltrex®Vet para articulaciones de alto movimiento. Los ejemplos comunes incluirían articulaciones de tercera falange, menudillo y rodilla. Sin embargo, otras articulaciones consideradas articulaciones de bajo movimiento (movimiento limitado, pero importante) también han mostrado una gran mejoría con la terapia con Noltrex®Vet. El ejemplo más común de una articulación de bajo movimiento sería la articulación distal del corvejón.

¿Cuánto tiempo de descanso necesita el caballo después de ser tratado con Noltrex®Vet?

Es mejor dejar que Noltrex®Vet haga efecto en la salud general de la articulación durante varias semanas. Como tal, lo mejor es que sea conservador con su rutina de ejercicios durante dos semanas después de la inyección. Un pequeño número de caballos con osteoartritis severa ocasionalmente desarrollan una claudicación e hinchazón alrededor de 10 a 14 días después de la inyección si vuelven a trabajar completamente dentro de la semana posterior a la inyección. Por lo tanto, si la condición del caballo es grave, es de suma importancia ser más conservador en las primeras semanas después del tratamiento.

¿Cuánto tiempo dura Noltrex®Vet en la articulación?

Con el tiempo, Noltrex®Vet se descompone mecánicamente en partículas más pequeñas debido a la fricción normal dentro de la articulación. Una vez que las partículas tienen un tamaño lo suficientemente pequeño, se eliminan de la articulación mediante un proceso de absorción y eliminación que se produce de forma natural aproximadamente entre 30 y 60 días después de la inyección. Esta función garantiza que no queden partículas residuales de Noltrex®Vet (poliacrilamida) en la articulación una vez que ya no sea beneficiosa. En comparación, la concentración de ácido hialurónico disminuye en horas después de la inyección.



Para ordenar visita Sitio web:

www.mitalpharma.com.mx

WhatsApp: 55 4331 0197

Oficina: 55 5087 6115

FB: mital.pharma | IG: mital.pharma

NOLTREX[®]
Synthetic Joint Lubricant **VET**

Preguntas Frecuentes



nucleus
— ProVets —

¿QUÉ ES NOLTREX®VET?

Noltrex®Vet es un hidrogel sintético compuesto principalmente por poliacrilamida tridimensional (4%) con un alto peso molecular de 10 millones de daltons. Para poner eso en contexto, Noltrex®Vet tiene un peso molecular de 3 a 5 veces mayor que el ácido hialurónico (AH) de alto peso molecular que es un componente importante del líquido articular normal. Una molécula de peso molecular más alto tardará más en descomponerse en la articulación, por lo que mantendrá la eficacia durante más tiempo que un producto con un peso molecular mucho menor. Por lo tanto, Noltrex®Vet tiene una ventaja sustancial sobre las terapias anteriores.



¿En cuánto tiempo se observa una mejora utilizando Noltrex®Vet?

La respuesta al tratamiento con Noltrex®Vet variará de individuo a individuo. Algunos caballos muestran una mejoría unos días después de la inyección, mientras que otros pueden tardar hasta 30 días. En general, se observa una mejora gradual durante un período de 1 a 3 semanas. Si un caballo mejora con una sola inyección pero no llega al 100% entonces se debe considerar una segunda inyección después de 5 a 6 semanas.

¿Noltrex®Vet es seguro?

Al día de hoy se han utilizado más de 1 millón de dosis de Noltrex® en humanos. En los Estados Unidos, el uso de Noltrex®Vet se está volviendo común en los atletas equinos de alto rendimiento. Al igual que con todos los tratamientos articulares, se requiere gran cuidado y habilidad por parte del veterinario que lo aplica para minimizar los riesgos de la inyección articular directa.

¿Hay condiciones que pueda tener el caballo que puedan afectar las opciones en terapia articular?

La respuesta corta es sí. Recuerde comprender al caballo en su totalidad, no solo su condición articular. Los caballos con síndrome similar a Cushing, úlceras gástricas o eventos previos de laminitis pueden afectar terapias con algunos productos convencionales. Noltrex®Vet es un sustituto seguro y eficaz en estos casos.

¿Noltrex®Vet es una opción de tratamiento para la primera vez?

La mayoría de los Médicos Veterinarios con experiencia en el uso de Noltrex®Vet lo consideran un excelente tratamiento para las articulaciones que no responden a otras terapias. Se recomienda igualmente en caballos que requieren más de un tratamiento o el manejo a largo plazo de una afección articular.

¿Con qué frecuencia debo volver a tratar a un caballo con Noltrex®Vet?

Muchas afecciones de las articulaciones se controlan, no se curan. En situaciones de manejo, se debe considerar mantener la articulación afectada con tratamientos a intervalos de 6 a 24 meses. Esta es una ventana muy grande, ya que la respuesta individual de un caballo al tratamiento, así como la gravedad de su condición, juegan un papel importante. Considere a cada paciente de forma individual y vigile el retorno de la claudicación para determinar un régimen de dosificación apropiado para la articulación en cuestión. Es ideal volver a tratar tan pronto como regresen los signos, o idealmente antes, para mantener un atleta sano y consistente.

¿Noltrex®Vet se puede usar con otras terapias?

Las decisiones de tratamientos articulares son complejas. No todos los casos pueden ser tratados de la misma manera con resultados idénticos. Noltrex®Vet puede usarse solo o en varias combinaciones. En ciertos protocolos, los médicos experimentados creen que Noltrex®Vet funciona de forma sinérgica para prolongar la duración y la eficacia de otros tratamientos.

¿Qué condiciones responden mejor a la terapia con Noltrex®Vet?

No todos los problemas de las articulaciones son artritis. Las articulaciones pueden tener diagnósticos diferentes o incluso múltiples causas que conducen a la claudicación. La consideración más importante es diagnosticar la articulación causante de la claudicación. Una vez que se identifica la articulación específica, Noltrex®Vet es benéfico en el tratamiento de muchas afecciones específicas.